



Käyttöohjeet

Modius™ edustaa uutta mullistavaa Careable Technology™ -teknologiaa, joka auttaa saamaan hoikemman vartalon.

Varoituksia ja varotoimia:

Aseta elektrodigeelityynyt vain kartiolisäkkeille korvien takana, kuten on opastettu toimitetuissa käyttöohjeissa. Älä aseta rinnallesi tai muualle päässä tai niskassa.

Modius™-tuotteen käyttö on keskeytettävä välittömästi, jos aiheutuu odottamattomia reaktioita.

Pidä tämä laite poissa lasten ulottuvilta. Pienet esineet, kuten elektrodityynyt, ovat tukehtumisriskejä.

Suosituksena on, että käytät tätä laitetta vain istuessasi tai ollessasi makuulla. It is recommended that you use this device only while seated or lying down. Ei saa käyttää autoa ajettaessa tai käytettäessä minkäänlaisia koneita.


Modius™ on indikoitu ainoastaan avustamaan yli 18-vuotiaita aikuisia koskien heidän painonsa menestystä ja painon ohjaamisen tavoitteita.

Sisältö

1. Modius™-pakkaus - sisältö	2
2. Aloittaminen	2
3. Modius™-kuulokkeidesi käyttäminen	3
4. Vianhaku	6
5. Modius™-laitteesi huoltaminen	7
6. Yleitä tuoteinformaatiota ja teknisiä spesifikaatioita	8
7. Säätely- ja turvallisuusilmoituksia	9
8. Yhteydenotto	12

1. Modius™-pakkaus - sisältö

1. Modius™-kuulokkeet

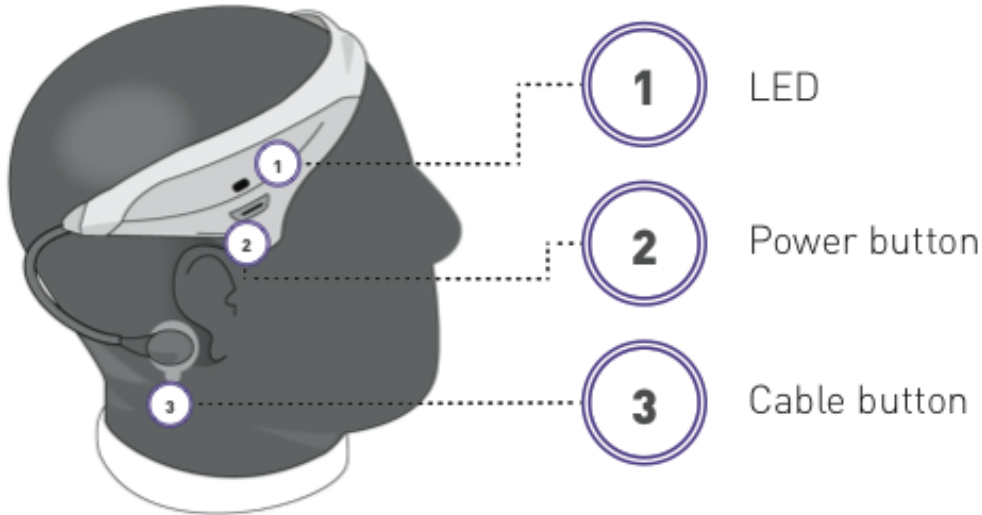

2. Modius™-kantolaukku

3. Modius™-pika-aloitusopas ja tärkeä turvallisuus- ja informaatio-opas

4. USB-latauskaapeli, 100 elektrodigeelityynyä, 100 spriipyhlintä.

Huomautus: Osat vaadittuja, mutta ei toimitettuna mukana:

- USB-pistotulppa
- Android 5.0 tai uudempi, tai iOS 9 tai uudempi

2. Aloittaminen

Modius™-kuulokkeiden lataaminen

- Liitä virtajohto USB-pistorasiaan ja kuulokkeisiin.
- Jos kuulokkeiden lataus onnistuu, LED-osoitin näkyy kiinteän keltaisena.
- Kun kuulokkeet on ladattu, LED-osoitin katkaistaan pois päältä.
- Jos liität virtajohdon kuulokkeisiin ja LED-osoitin vilkkuu keltaisena, laitteessa on latausvirhe (ks. "Vianhaku").

HUOMAUTUS: Varmista, että irrotat latausjohdon, ennen kuin yrität käyttää kuulokkeita.

Parittamalla kuulokkeet puhelimeen

- Ennen aloittamista varmista, että:
 - Kuulokkeet on ladattu (ks. "Kuulokkeiden lataaminen") ja että latausjohto on irrotettu.
 - Kuulokkeet on asetettu: paina virtapainiketta kuulokkeiden sivulla yli 10 sekuntia, kunnes kuulet sarjan piippauksia.
 - Langaton Bluetooth-teknologia on käytössä puhelimesi.

Olet asentanut Modius™-sovelluksen Apple® App Store'ista tai Google Play®'istä ja täyttänyt rekisteröintiprosessin.

- Kuulokkeiden virta katkaistu pois päältä:
 - Paina virtapainiketta kuulokkeiden sivulla neljä sekuntia
 - Kuulet kimeän piippauksen, virtapainike vilkkuu valkoisena ja LED-ilmaisina vilkkuu sinisenä osoittaen, että se on käännetty päälle ja valmis pariutumaan.
- Käynnistä Modius-laite puhelimesi; sovellus antaa osoituksen, että se etsii kuulokkeitasi.
- Kun kuulokkeet liittyvät sovellukseen, kuulet kaksi lyhyttä piipausta ja LED-osoitin vilkkuu sinisenä. Tässä kuulokkeet antavat sinun tietää, että puhelimesi on pyytänyt pariutua sen kanssa.
- Klikkaa virtapainiketta kuulokkeella kerran parituksen hyväksymiseksi.
- Älypuhelimesi ilmoittaa, että kuulokkeet haluavat pariutua puhelimesi kanssa. Hyväksy pariutuminen.
- Voi viedä noin 10 sekuntia pariutumisen suorittamiseksi.
- Kun pariutuminen on suoritettu, sovelluksen liitännän pitäisi muuttua ja antaa sinun kontrolloida kuulokkeitasi.

3. Modius™-kuulokkeidesi käyttäminen


Suosittelun käyttäminen

Suosittelu käyttäminen on 45 minuuttia/maksimissa yksi tunti per päivä. Turvatoimintona Modius™ pysäyttää stimulaation automaattisesti, jos ylität yhden tunnin käytön per päivä. Voit aloittaa uuden istunnon, kun on kulunut 16 tunnin ajanjakso; tämä antaa joustavuutta käyttöruutiinillesi.

Huomautus: Ks. varoituksia ja varotoimia lisätietojen saamiseksi tuotteen turvallisuudesta.

Kuinka käyttää kuulokkeitasi

- Käytä alkoholipyyhettä kartioliäkkeisiin, kovaan luiseen alueeseen korviesi takana .
- Napsauta geelityynyliitin molempien Modius™-johtojen päihin (kaapelipainike).
- Aseta Modius™ päähäsi virtapainikkeen ollessa oikean korvasi yläpuolella.

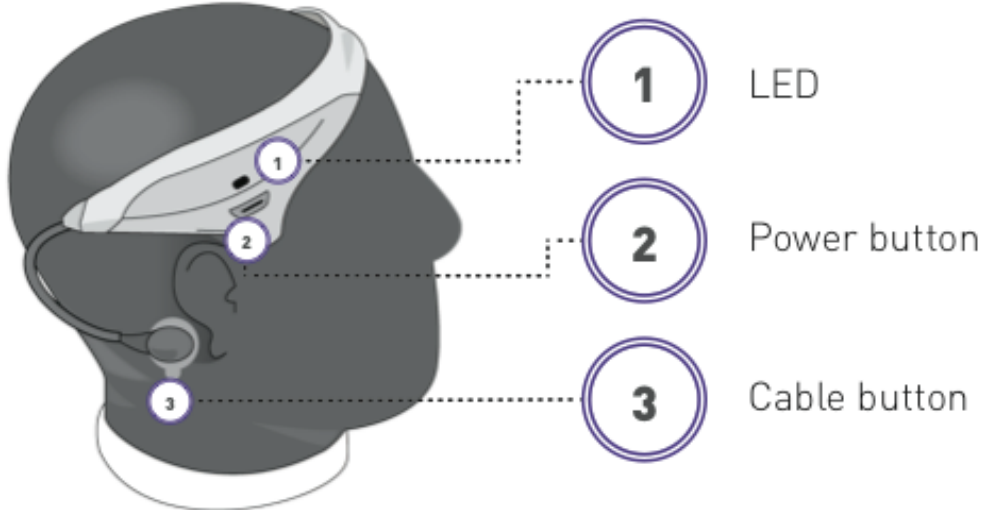

- Poista suojaava muovipäällyys geelityynyistä.
- Harjaa kaikki hiukset pois tieltä ennen geelityynyjen kiinnittämistä puhtaaseen ihoon, sillä tyynyn liima voi tarttua ja vetää hiuksia.

Kuulokkeiden kääntäminen päälle ja uuden istunnon aloittaminen

- Varmista, että
 - o Kuulokkeet on ladattu, käännetty päälle ja liitetty puhelimeesi.
 - o Kuulokkeet on asetettu mukavasti päähäsi ja elektrodit on kiinnitetty ohjeiden mukaisesti.
- Käännä kuulokkeet päälle painamalla virtapainiketta kaksi sekuntia. Kuulet kimeän piippauksen ja LED-valo vilkkuu.
- Navigoi sovelluksessa "Dashboard" välilehteä.
- Klikkaa painiketta "Start Session".
- Kun kuulet kolme lyhyttä, kimeää piippausta ja LED-osoitin vilkkuu toistuvasti valkoisena, olet lopettanut istuntesi.

Tehotason lisääminen

- Varmista, että
 - o Kuulokkeet on käännetty päälle ja liitetty puhelimeesi.
 - o Kuulokkeet on asetettu mukavasti päähäsi ja elektrodit on liitetty ohjeiden mukaisesti.
 - o Olet käynnistänyt istunnon.
- Navigoi Modius™-sovelluksella "Dashboard" välilehteen.
- Klikkaa sinistä ympyrää, jossa on kuvake "+" sen keskellä sijaiten senhetkisen istunnon edistyneen alapuolella; kuulet lyhyen, kimeän piippauksen kuulokkeista.
- Kuulokkeiden maksimi teho on 10; jos yrität lisätä tehotasoa edelleen, kuulet kaksi lyhyttä kimeää piippausta osoittamaan, että olet maksimilla tehotasolla.

Tehotason alentaminen

- Varmista, että
 - Kuulokkeet on käännetty päälle ja liitetty puhelimeesi.
 - Kuulokkeet on asetettu mukavasti päähäsi ja elektrodit on liitetty ohjeiden mukaisesti.
 - Olet käynnistänyt istunnon.
- Navigoi sovelluksella "Dashboard" välilehdelle.
- Klikkaa sinistä ympyrää, jossa on kuvake "-" sen keskellä sijaiten senhetkisen istunnon edistymisen alapuolella; kuulet lyhyen, kimeän piippauksen kuulokkeista.
- Kuulokkeiden minimi taso on 1; jos yrität vähentää tehotasoa edelleen, kuulet kaksi lyhyttä kimeää piippausta osoittamaan, että kuulokkeet eivät ole enää stimuloituna ja ovat tasolla '0', lähinnä odotustilassa.

Varoitus

- Jos tunnet olosi epämukavaksi istunnon aikana, keskeytä istunto ja vähennä intensiivisyyttä ennen sen jatkamista. Mahdollisia riskejä tai haittavaikutuksia ovat mm.: ihon ärsyntyminen, epämukavuuden tunne stimulaatiosta; tasapainon menetyksen tunne, ajoittainen pahoinvointi ja harvoin ilmenevä oksentaminen. Jos ongelma jatkuu parin päivän jälkeen, hae lääkärin neuvoja.
- Huomautus: Ks. varoituksia ja varotoimia lisätietojen saamiseksi tuotteen turvallisuudesta.

Modius™-kuulokkeidesi nollaus

Joskus voi olla välttämätöntä nollata kuulokkeesi, jos koet ongelmia tai haluat antaa ne jollekin toiselle henkilölle. Jos sinun on nollattava kuulokkeesi, noudata seuraavassa annettuja ohjeita.

HUOMAUTUS: Kuulokkeidesi nollaus voi aiheuttaa sellaisen datan menetyksen, jota ei ole synkronoitu sovelluksen kanssa. Nollausohjeita ei pidä väärinkäyttää henkilökohtaisen päivittäisen käytön lisäämiseksi.

- Liitä toimitettu virtajohto USB-latausporttiin ja kuulokkeisiin
- Varmista, että LED on valaistuna (osoittaen, että kuulokkeet ovat latautumassa)
- Pidä virtapainiketta kuulokkeiden sivulla painettuna yli 10 sekuntia, kuunnes kuulet sarjan piippauksia.
- Laite on nyt nollattu ja sinun pitäisi pystyä käyttämään kuulokkeita normaaliin tapaan.

Kuulokkeidesi kääntäminen pois päältä

- Käytön aikana tai kun laite on odotustilassa ja valmis käytettäväksi, paina virtapainiketta kuulokkeiden sivulla vähintään kaksi sekuntia.
- Kuulet kimeän piippauksen osoittamaan, että kuulokkeiden virta on katkaistu pois päältä ja 10 sekunnin kuluttua sovellus palautuu hakemaan kuulokkeitasi.
- Lataa kuulokkeesi jokaisen käyttökerran jälkeen valmiiksi seuraavaa istuntoa varten.

4. Vianhaku

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kuulokkeeni kääntyvät päälle, mutta eivät anna minun käynnistää istuntoa	Kuulokkeet on liitetty latausjohtoon	Irrota johto ennen istunnon käynnistämisen yrittämistä
Kuulokkeeni eivät käänny päälle	Kuulokkeitani ei ole ladattu	Kiinnitä kuulokkeet latausjohtoon
	Kuulokkeet ovat syöttäneet syvään odotustilaan	Liitä kuulokkeet latausjohtoon ja yritä kytkeä virta niihin
Kuulokkeeni toimivat jonkun aikaa ja kääntyvät sen jälkeen itsestään pois päältä	Vastus tyynyjen välillä on liian korkea	Varmista, että olet käyttänyt alkoholipyyhimiä ennen geelityynujen levittämistä ihollesi, että tyyny on asetettu oikein korviesi taakse ja että tyynyjen ja ihosi välillä ei ole hiuksia
	Elektrodeihin kiinnitetty tyyny ovat kuluneet	Vaihda geelityynyt kuulokkeilla
Kuulokkeeni eivät liity puhelimeeni	Puhelimeesi ei ole kytketty Bluetooth-toimintoa	Varmista, että Bluetooth® on kytketty puhelimeesi
	Puhelimessasi on tiettyjä ongelmia kuulokkeita haettaessa	Käynnistä sovellus uudelleen puhelimessasi
Parituksen aikana kuulen kolme lyhyttä, kimeää piippausta ja LED-osoitin vilkkuu sinisenä kolme kertaa	Kuulokkeet aikakatkaistiin puhelimesta odottaessa parituspyyntöä koskevaa hyväksyntääsi	Käännä kuulokkeet pois päältä ja yritä paritusta uudelleen noudattaen ohjeita osassa "Kuulokkeidesi paritus puhelimeesi"
Koen epämukavuutta kuulokkeita käyttäessäni	Laitteen tehotaso on ehkä liian korkea	Vähennä laitteen virtatasoa käyttäen sovellusta, kunnes tunnistat hellästi keinuttavan tunteen tai kunnes epämukavuus laantuu

Kun liität kuulokkeet laturiin, LED-osoitin vilkkuu keltaisena	Laitteessa on latausvirhe	Yritä liittää latausjohto erilaiseen USB-liittimeen ja, jos tämä ei ratkaise ongelmaasi, ota yhteyttä tukeen
LED-osoitin kuulokkeissani vilkkuu keltaisena ja kuulen kolme lyhyttä piippausta	Kuulokkeiden pariston teho on alhainen	Lataa kuulokkeet (Ks. "Kuulokkeidesi lataaminen")
Kun yritän kääntää kuulokkeet päälle, kuulen kolme matalaa piippausta	Kuulokkeinen paristo on kriittinen	Lataa kuulokkeet (Ks. "Kuulokkeidesi lataaminen")

5. Modius™-laitteesi huoltaminen

Kuulokkeet

Käskyjä

- Pyyhi puhtaaksi pehmeällä kankaalla.
- Käännä kuulokkeet pois päältä käytön jälkeen (tai irrota puhelimesi kuulokkeista).
- Lataa kuulokkeet täyteen ennen niiden asettamista takaisin koteloonsa kunkin käyttökerran jälkeen.

Kieltoja

- Älä käytä voimakkaita hankausaineita tai vahvoja puhdistusaineita.
- Vältä kuulokkeiden kastumista
- Älä upota nesteeseen.
- Älä jätä liialliseen auringonvaloon.
- Älä jätä Modius™-laitetta tilanteeseen, jossa päänauha tulee litistetyksi tai venytetyksi. Tämä vaikuttaa päähäsi sopivuuden mukavuuteen ja turvallisuuteen.

Geelityynyt

Käskyjä

- Harjaa pois tieltä kaikki hiukset ennen geelityynyjen kiinnittämistä puhtaaseen ihoon, muuten ne voivat tarttua tyynyihin.
- Varmista, että ihosi on puhdas ja ilman meikkiä, voiteita ja muita hoitoaineita ennen tyynyjen käyttämistä.
- Puhdista kädet ennen tyynyjen käsittelemistä ja vältä niiden koskettamista sormillasi niin paljon kuin mahdollista.
- Suorita tyynyjen hävittäminen panemalla ne sopivaan astiaan tai roskapönttöön käytön jälkeen.





Kieltoja

- Älä jaa geelityynyjä kenenkään muun kanssa. Tyynyt on tarkoitettu vain yhden henkilön käytettäväksi.
- Älä käytä tyynyä kauemmin kuin suositellun yhden tunnin ajan istuntoa kohti.

6. Yleitä tuoteinformaatiota ja teknisiä spesifikaatioita

Tekninen spesifikaatio: Modius™ Headset

Mallin nimi	ML600
Kanavat	Yksittäinen
Virta	
Pariston kestoikä	Noin 10 tuntia tasolla 10 Stim – Noin 4 tai 5 päivää nominaalikäytössä
Syöttöliitäntä	Täysin eristetty kosketuskestävä mikro USB
Paino	85 g
Koko	180x140x70mm
Virtalähteen syöttöinformaatiota	
Mikro Jännite	USB-portti
Maks. virta	4,75 – 5.25 V
	155 mA D.C
Maksimi lähtöjännite	20 V
Maksimi lähtövirta	600uA.
Bluetooth BLE - BGM113	
Käyttötaajuuskaista	2,4 GHz Bluetooth-toiminnon alhaisen energian toiminnollisuutta varten
Lähetetty maksimi RF-teho	+3 dBm
Paristo (Paristo ei ole käyttäjän vaihdettavissa)	
Litiumpolymeeri	3.7v 165mAh
Ympäristölliset olosuhteet	
Käyttölämpötila:	0 - 50°C
Säilytyslämpötila:	-20 - 60°C
Veden vastus	0 m

<p>Odotettu palvelun kestoikä</p>	<p>Kone on taattu yhdeksi vuodeksi, mutta kestää usein pidempään.</p> <p>Lisätarvikkeet (johdot, tyynyt ja pyyhkimet) eivät ole takuun kattamia</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Johdon kestoikä riippuu suuresti käytöstä. Käsittele johtoja aina huolella <input type="checkbox"/> Elektrodityynyt kestävät vain yhden käyttökerran ajan ja tutustu valmistajan informaatioon koskien päättymistä. <input type="checkbox"/> Koskien pyyhintä tutustu valmistajan pakkaukseen tietojen saamiseksi niiden keston päättymisestä.
<p>Säilytyksen kesto aika</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kuulokkeilla ei ole kiinteää säilyvyysaikaa <input type="checkbox"/> Tutustu valmistajan informaatioon tietojen saamiseksi lisätarvikkeiden (tyynyt, johdot ja pyyhkimet) säilyvyysajoista
	<p>Tuotteen valmistaja on Neurovalens, Ormeau Baths, 18 Ormeau Avenue, Belfast, N. Ireland, BT2 8HS.</p>
	<p>Yksikkö ei ole vedenkestävä ja sitä on suojeltava nesteiltä</p>
	<p>Tutustu lisäsymboleihin ja käyttöoppaaseen lisätietojen saamiseksi</p>
	<p>Sarjanumero tuotteen tarrassa tuotteen tunnistamiseksi</p>

Tekninen spesifikaatio: Kulutustuotteet (elektrodityynyt, pyyhkimet)

Käytä vain pakkauksessa toimitettuja tai Neurovalens-yhtiön suosittelemia kulutustuotteita. Tutustu valmistajan ohjeisiin.

Palautuksen ja takuun toimintaohjelma

Lisäinformaatiota on saatavana seuraavassa www.modiushealth.com/conditionsofsale

7. Säätely- ja turvallisuusilmoituksia

Vaatiimustenmukaisuusvaatimus - Mallin nimi: ML600

Neurovalens julistaa täten, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien ehtojen, yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin - 2001/95/EC ja radiolaitteita koskevan direktiivin 2014/53 EUkanssa. Nähdäksesi täyden vaatimustenmukaisuusvakuutuksen vieraile verkkosivustolla www.modiushealth.com/compliance.



Sisältää FCC ID:n: QOQBGM113

Tämä laite on yhdenmukainen FCC:n sääntöjen osan 15 kanssa. Toiminta on seuraavan kahden ehdon alainen:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa vahingollista häiriötä ja
2. Tämän laitteen täytyy hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö mukaan lukien häiriö, mikä voi aiheuttaa ei-toivotun toiminnan.



Modius™ on yhteensopiva radiolaitteita koskevan direktiivin 2014/53 EU kanssa.

FDA FDA pitää Modius™-laitetta yleisen hyvinvoinnin laitteena eikä näin ollen saata voimaan sääntelyvaatimuksia.

Serifioitu Siliconlabsin kautta
FCC ID:
IC ID:

FCC-15C
QOQBGM113
5123A-BGM113

Turvallisuuslausunto

Tämä laite on testattu noudattamaan sähkömagneettista yhteensopivuutta ja turvallisuussertifiointia EN-standardien mukaisesti: EN301489-3, EN301489-17 ja EN 60950-1

Modius™ on testattu ja on yhteensopiva tunnistettujen standardien kanssa koskien immunitteettia radiotaajuushäiriöihin käyttötaajuusalueella 2.4 GHz.

Huomautus: Modius™ on indikoitu ainoastaan avustamaan yli 18-vuotiaita aikuisia koskien heidän painonsa menetystä ja painon ohjaamisen tavoitteita.

Turvallisuusvaroituksia ja varotoimia - Kuulokkeet



Muistutus

Tutustu toimitettuun informaatioon ja ohjeisiin ennen Modius™-kuulokkeiden käyttöä. Aseta elektrodigeelityynyt vain kartiolisäkkeille korvien takana, kuten on opastettu toimitetuissa käyttöohjeissa. Älä aseta rinnallesi tai muualle päässä tai niskassa.

Älä käytä, jos olet raskaana, jos kärsit refleksi epilepsiasta, jota laukaisee vestibulaarinen stimulaatio tai jos käytät sydämentahdistinta.

Modius™-tuotteen käyttö on keskeytettävä välittömästi, jos aiheutuu odottamattomia reaktioita.

Käskyjä

Levitä tyynyt vain kartiolisäkkeisiin, kova luinen alue korvasi takana, kuten on opastettu edellä olevissa ohjeissa. Älä aseta rinnallesi tai muualle päässä tai niskassa. Ks. osaa "Kuinka kuulokkeita käytetään".

Käytä vain istuttaessa tai oltaessa makuulla.

Pidä tämä laite poissa lasten ulottuvilta. Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää tätä tuotetta.

Kieltoja

Älä käytä, jos olet raskaana, jos kärsit refleksi-epilepsiasta, jota laukaisee vestibulaarinen stimulaatio tai jos sinulla on istutettu sydäntahdistin, sydämen defibrillaattori tai neurostimulaatiolaitte. Huomautus: Modius™ stimuloi aivojen vestibulaarista (tasapaino) järjestelmää. Näin ollen vaikka tämän ei pitäisi vaikuttaa useimpiin epilepsiasta kärsiviin ihmisiin, se voi laukaista kohtauksen jossakin vestibulaarisesta refleksi-epidemiasta kärsivässä henkilössä. Ollessaan epäätietoisia asiasta epilepsiasta kärsivien mahdollisten käyttäjien on ensin keskusteltava asiasta perhelääkäriensä kanssa.

Älä käytä tätä liikkuessasi, sillä se voi vaikuttaa tasapainon tunteeseen.

Älä käytä nautittaessa alkoholia, ajettaessa autoa tai käytettäessä minkäänlaisia koneita.

Älä käytä märässä ympäristössä tai upota kuulokkeita veteen.

Älä jaa geelityynyjäsi kenekään muun kanssa. Ne on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön.

Älä käytä tynyä kauemmin kuin suositellun yhden tunnin ajan istuntoa kohti.

Suosituksena on hävittää tynny kunkin käyttökerrän jälkeen. Pidennetty tai toistettu yhden tynny käyttäminen voi vähentää sen tehokkuutta tai aiheuttaa ihon ärtymisen.

Älä käytä tynyä rikkoutuneella tai ärsyyntyneellä iholla.

Poista tynny varoen iholta käytön jälkeen. Suorita tynnyjen hävittäminen panemalla ne sopivaan astiaan tai roskapönttöön.

Älä yritä poistaa paristoja. Ne eivät ole käyttäjän vaihdettavissa.

Huomautus:

Laite ei ole lääkinnällinen laite eikä se korvaa terveellistä elämäntapaa eikä ammattimaista lääkärin hoitoa.

Modius™-tuotteen käyttö on keskeytettävä välittömästi, jos aiheutuu odottamattomia reaktioita. Jos tunnet olosi epä mukavaksi istunnon aikana, keskeytä istunto ja vähennä intensiivisyyttä ennen sen jatkamista. Mahdollisia riskejä tai haittavaikutuksia ovat mm.: ihon ärsyyntyminen, epä mukavuuden tunne stimulaatiosta; tasapainon menetyksen tunne, ajoittainen pahoinvointi ja harvoin ilmenevä oksentaminen. Jos ongelma jatkuu parin päivän jälkeen, hae lääkärin neuvvoja.

Suosittelut käyttö on 45 minuuttia/päivä ja maksimina yksi tunti. Modius™ pysäyttää stimuloinnin automaattisesti, jos ylität sen käytön yli yhdellä tunnilla per päivä - tai varsinaisesti 16 tunnin ajanjakson välttääksesi tulematta 'lukituksi ulos', jos haluat käyttää Modius™ -laitetta muutamia tunteja aikaisemmin jonakin päivänä.

Nollausohjeita ei pidä väärinkäyttää henkilökohtaisen päivittäisen käytön lisäämiseksi.

Lue nämä määräykset ja varotoimet ja noudata niitä. Säilytä tämä opas kuulokkeidesi yhteydessä.

Sisään rakennetun pariston varotoimia

Modius™-kuulokkeissasi on sisään rakennettu paristo, joka ei ole käyttäjän vaihdettavissa.

Älä peukaloi tuotettasi äläkä yritä avata sitä, sillä tämä mitätöi takuun ja voi aiheuttaa turvallisuusriskin. Lataa kuulokkeet tämän käyttöoppaan mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti käyttäen virtalähdettä, joka on sertifioitu tunnistetun testauslaboratorion toimesta.

Hävittämistä ja kierrätystä koskevaa informaatiota



Yksi Euroopan direktiivin 2002/96/CE ehtoista on, että kaikkia elektronisia laitteita on käsiteltävä elektronisena jätteenä eikä niitä saa heittää roskeen. Muistuttamiseksi tästä direktiivistä kaikki kyseiset tuotteet on nyt merkitty ylipyyhityllä roskapönttösymbolilla, kuten on kuvattu edellä.

Tuotteen kestoajan päättyessä älä heitä tätä tuotetta tai paristoja normaaliin kotitalousroskikseen, vaan vie ne elektronisten laitteiden kierrätyksen keräyspaikalle. Väärä hävitys voi aiheuttaa vaarallisten myrkkujen kerääntymisen ilmaan, veteen ja maahan ja voi olla vahingollista ihmisten terveydelle.

Huomautus: Hävitä tyynyt ja pyyhkimet sopivassa astiassa tai roskapöntössä.

Käyttölupainformaatiota



Modius™ käyttää Bluetooth-toimintoa

Ehdot ja edellytykset

Lisätietoja on saatavana vieraillemalla verkkosivulla www.modiushealth.com/conditionsofsale

8. Yhteydenotto

www.modiushealth.com

hello@modiushealth.com

support.modiushealth.com



Valmistajana Neurovalens, Ormeau Baths, 18 Ormeau Avenue, Belfast, BT2 8HS