



Εγχειρίδιο χρήσης

Το Modius™ είναι μια επαναστατική νέα τεχνολογία Careable Technology™ που σας βοηθά να αποκτήσετε ένα πιο σφριγηλό σώμα.



Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:

Τοποθετείτε τα επιθέματα γέλης ηλεκτροδίων μόνο στις μαστοειδείς αποφύσεις, πίσω από τα αυτιά, όπως αναφέρεται στις οδηγίες που παρέχονται. Μην τα τοποθετείτε στο στήθος σας ή σε άλλο σημείο στο κεφάλι ή στον λαιμό.

Η χρήση του Modius™ θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως αν προκύψουν μη αναμενόμενες αντιδράσεις. Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά. Τα μικρά αντικείμενα, όπως τα επιθέματα ηλεκτροδίων, ενέχουν κίνδυνο πνιγμού. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο ενώ κάθεστε ή είστε ξαπλωμένοι. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την οδήγηση ή τον χειρισμό μηχανημάτων οποιουδήποτε είδους.


Το Modius™ ενδείκνυται αποκλειστικά για υποβοήθηση ενηλίκων, ηλικίας άνω των 18 ετών, με την απώλεια βάρους και τους στόχους διαχείρισης του βάρους τους.

Περιεχόμενα

1. Συσκευασία Modius™ - περιεχόμενα.....	2
2. Πώς να ξεκινήσετε.....	2
3. Χρήση της συσκευής κεφαλής Modius™.....	3
4. Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	6
5. Φροντίδα του Modius™.....	8
6. Γενικές πληροφορίες προϊόντος και τεχνικές προδιαγραφές.....	8
7. Ειδοποιήσεις κανονισμών και ασφαλείας.....	10
8. Επικοινωνία.....	13

1. Συσκευασία Modius™ - περιεχόμενα

1. Συσκευή κεφαλής Modius™

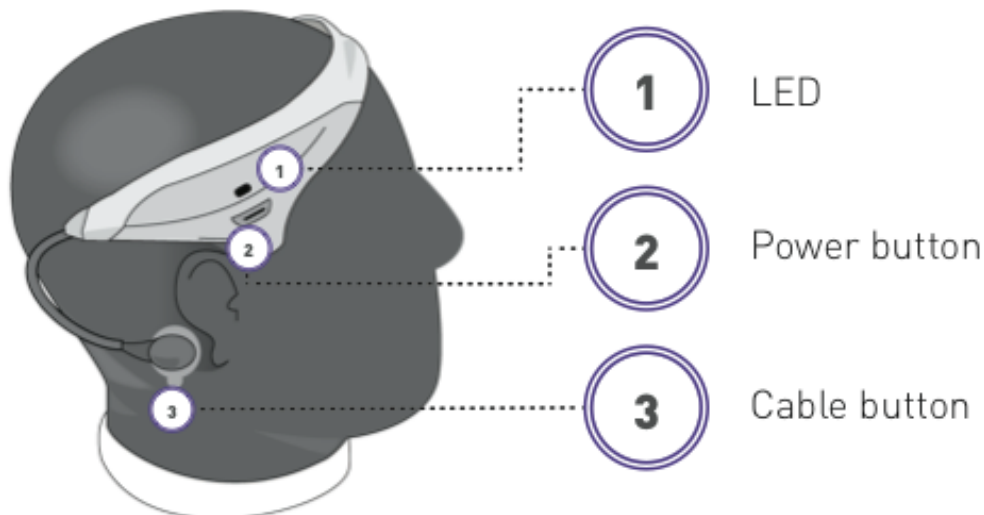

2. Θήκη μεταφοράς Modius™

3. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Modius™ και Οδηγός σημαντικών πληροφοριών ασφαλείας και προϊόντος
4. Καλώδιο φόρτισης USB, 100 επιθέματα γέλης ηλεκτροδίων, 100 μαντηλάκια αλκοόλης.

Σημείωση: Είδη που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται:

- Προσαρμογέας πρίζας USB
- Android 5.0 ή νεότερη έκδοση, ή iOS 9 ή νεότερη έκδοση.

2. Πώς να ξεκινήσετε...

Φόρτιση της συσκευής κεφαλής Modius™

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται σε μια υποδοχή USB και στη συσκευή κεφαλής.
- Αν η συσκευή κεφαλής φορτίζεται επιτυχώς, η ενδεικτική λυχνία LED θα είναι σταθερά αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα.
- Όταν η συσκευή κεφαλής φορτιστεί, η ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσει.
- Αν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στη συσκευή κεφαλής και η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα, η συσκευή αντιμετωπίζει κάποιο σφάλμα φόρτισης (δείτε την ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων»).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης προτού επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κεφαλής σας.

Σύζευξη της συσκευής κεφαλής με το τηλέφωνό σας

- Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:
 - Η συσκευή κεφαλής σας είναι φορτισμένη (δείτε την ενότητα «Φόρτιση της συσκευής κεφαλής») και το καλώδιο φόρτισης έχει αποσυνδεθεί.
 - Η συσκευή κεφαλής είναι ρυθμισμένη: πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο πλάι της συσκευής κεφαλής για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε μια αλληλουχία χαρακτηριστικών σύντομων ήχων.
 - Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνό σας.
- Έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Modius™ από το Apple® App Store ή το Google Play® και έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής.
- Με τη συσκευή κεφαλής απενεργοποιημένη:
 - Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο πλάι της συσκευής κεφαλής για 4 δευτερόλεπτα
 - Θα ακούσετε έναν παρατεταμένο ήχο, το κουμπί λειτουργίας θα αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και έτοιμη για σύζευξη.
- Εκκινήστε την εφαρμογή συσκευής Modius στο τηλέφωνό σας. Η εφαρμογή θα υποδείξει ότι αναζητά τη συσκευή κεφαλής σας.
- Μόλις η συσκευή κεφαλής συνδεθεί με την εφαρμογή, θα ακούσετε δύο σύντομους ήχους και η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Με αυτόν τον τρόπο η συσκευή κεφαλής σας γνωστοποιεί ότι το τηλέφωνό σας έχει ζητήσει να συζευχθεί μαζί της.
- Κάντε κλικ μία φορά στο κουμπί λειτουργίας στη συσκευή κεφαλής για να αποδεχτείτε τη σύζευξη.
- Στο smartphone σας, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει ότι η συσκευή κεφαλής επιθυμεί να συζευχθεί με το τηλέφωνό σας. Αποδεχτείτε τη σύζευξη.
- Ενδέχεται να χρειαστούν περίπου 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η σύζευξη.
- Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, το περιβάλλον χρήσης της εφαρμογής θα πρέπει να αλλάξει, για να σας επιτρέψει να ελέγχετε τη συσκευή κεφαλής σας.

3. Χρήση της συσκευής κεφαλής Modius™


Συνιστώμενη χρήση

Η συνιστώμενη χρήση είναι 45 λεπτά/1 ώρα το μέγιστο ανά ημέρα. Ως χαρακτηριστικό ασφαλείας, το Modius™ θα διακόψει αυτόματα τη διέγερση αν υπερβείτε την 1 ώρα χρήσης ανά ημέρα. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα συνεδρία αφού παρέλθει μια περίοδος 16 ωρών. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε μια ευέλικτη ρουτίνα χρήσης.

Σημείωση: Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος, δείτε τις Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

Πώς να φορέσετε τη συσκευή κεφαλής σας

- Χρησιμοποιήστε ένα μαντηλάκι αλκοόλης για να καθαρίσετε το δέρμα στις μαστοειδείς αποφύσεις, τη σκληρή οστεώδη περιοχή πίσω από τα αυτιά σας.
- Ασφαλίστε ένα κλιπ επιθέματος γέλης στις άκρες και των δύο καλωδίων του Modius™ (κουμπί καλωδίου).
- Τοποθετήστε το Modius™ στο κεφάλι σας, με το κουμπί λειτουργίας πάνω από το δεξί αυτί σας.

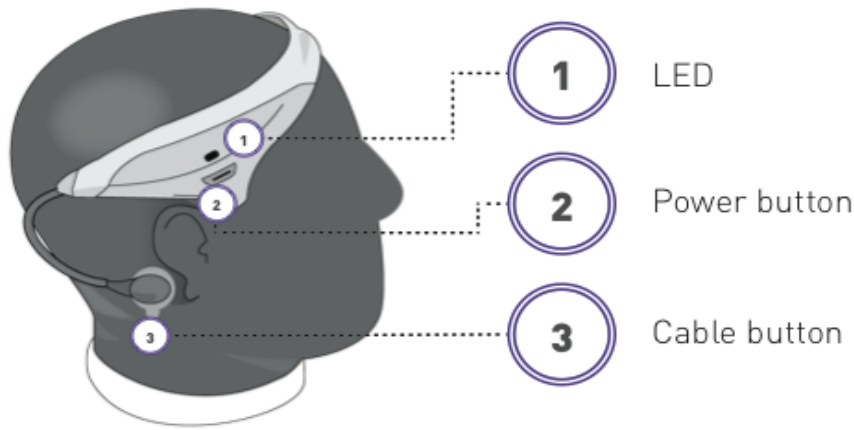

- Αφαιρέστε το προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα από τα επιθέματα γέλης.
- Απομακρύνετε με μια βούρτσα τυχόν τούφες μαλλιών προτού προσαρτήσετε τα επιθέματα γέλης για να καθαρίσετε το δέρμα, καθώς η κολλητική ουσία του επιθέματος ενδέχεται να κολλήσει στα μαλλιά και να τα τραβήξει.

Ενεργοποίηση της συσκευής κεφαλής και έναρξη νέας συνεδρίας

- Βεβαιωθείτε ότι
 - ο Η συσκευή κεφαλής είναι φορτισμένη, ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη με το τηλέφωνό σας.
 - ο Η συσκευή κεφαλής είναι τοποθετημένη άνετα στο κεφάλι σας και τα ηλεκτρόδια είναι προσαρτημένα σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή κεφαλής πατώντας το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν ήχο υψηλής έντασης και η λυχνία LED θα αναβοσβήνει.
- Στην εφαρμογή, πλοηγηθείτε στην καρτέλα «Dashboard».
- Κάντε κλικ στο κουμπί «Start Session».
- Όταν ακούσετε 3 σύντομους ήχους υψηλής έντασης και η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει επανειλημμένα με λευκό χρώμα, έχετε ολοκληρώσει τη συνεδρία σας.

Αύξηση της στάθμης ισχύος

- Βεβαιωθείτε ότι
 - ο Η συσκευή κεφαλής είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη με το τηλέφωνό σας.
 - ο Η συσκευή κεφαλής είναι τοποθετημένη άνετα στο κεφάλι σας και τα ηλεκτρόδια είναι προσαρτημένα σύμφωνα με τις οδηγίες.
 - ο Έχετε ξεκινήσει μια συνεδρία.
- Στην εφαρμογή Modíus™, πλοηγηθείτε στην καρτέλα «Dashboard».
- Κάντε κλικ στον μπλε κύκλο με το εικονίδιο «+» στη μέση, που βρίσκεται κάτω από την πρόοδο της τρέχουσας συνεδρίας σας. Θα ακούσετε έναν σύντομο ήχο υψηλής έντασης από τη συσκευή κεφαλής.

- Η μέγιστη στάθμη ισχύος της συσκευής κεφαλής είναι 10. Αν προσπαθήσετε να αυξήσετε επιπλέον τη στάθμη ισχύος, θα ακούσετε 2 σύντομους ήχους υψηλής έντασης που υποδεικνύουν ότι βρίσκεστε στη μέγιστη στάθμη ισχύος.

Μείωση της στάθμης ισχύος

- Βεβαιωθείτε ότι
 - Η συσκευή κεφαλής είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη με το τηλέφωνό σας.
 - Η συσκευή κεφαλής είναι τοποθετημένη άνετα στο κεφάλι σας και τα ηλεκτρόδια είναι προσαρτημένα σύμφωνα με τις οδηγίες.
 - Έχετε ξεκινήσει μια συνεδρία.
- Στην εφαρμογή, πλοηγηθείτε στην καρτέλα «Dashboard».
- Κάντε κλικ στον μπλε κύκλο με το εικονίδιο «-» στη μέση, που βρίσκεται κάτω από την πρόοδο της τρέχουσας συνεδρίας σας. Θα ακούσετε έναν σύντομο ήχο χαμηλής έντασης από τη συσκευή κεφαλής.
- Η ελάχιστη στάθμη ισχύος της συσκευής κεφαλής είναι 1. Αν προσπαθήσετε να μειώσετε επιπλέον τη στάθμη ισχύος, θα ακούσετε 2 σύντομους ήχους χαμηλής έντασης που υποδεικνύουν ότι η συσκευή κεφαλής δεν διεγείρει πλέον και βρίσκεται στη στάθμη «0», ουσιαστικά σε κατάσταση αναμονής.

Προειδοποίηση

- Αν νιώσετε οποιαδήποτε δυσφορία κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας, διακόψτε τη συνεδρία και μειώστε την ένταση προτού συνεχίσετε. Οι πιθανοί κίνδυνοι ή οι ανεπιθύμητες επιδράσεις περιλαμβάνουν τα εξής: ερεθισμός δέρματος, δυσφορία από τη διέγερση, αίσθηση απώλειας ισορροπίας, περιστασιακή ναυτία και, σπάνια, εμετός. Αν κάποιο πρόβλημα επιμένει για περισσότερες από 1-2 ημέρες, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.
- Σημείωση: Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος, δείτε τις Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

Επαναφορά της συσκευής κεφαλής Modius™

Ενδέχεται ενίοτε να είναι απαραίτητο να επαναφέρετε τη συσκευή κεφαλής σας, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή αν θέλετε να τη δώσετε σε κάποιον άλλο. Αν χρειάζεται να επαναφέρετε τη συσκευή κεφαλής σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επαναφορά της συσκευής κεφαλής σας ενδέχεται να προκαλέσει την απώλεια δεδομένων που δεν έχουν συγχρονιστεί με την εφαρμογή. Οι οδηγίες επαναφοράς δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται καταχρηστικά, προκειμένου να αυξηθεί η προσωπική ημερήσια χρήση.

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται σε μια θύρα φόρτισης USB και στη συσκευή κεφαλής
- Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED είναι αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα (υποδεικνύοντας ότι η συσκευή κεφαλής φορτίζεται)
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στο πλάι της συσκευής κεφαλής για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε μια αλληλουχία ήχων.
- Πλέον η συσκευή έχει επαναφερθεί και θα πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κεφαλής σας ως συνήθως.

Απενεργοποίηση της συσκευής κεφαλής

- Κατά τη χρήση της συσκευής ή όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και είναι έτοιμη για χρήση, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο πλάι της συσκευής κεφαλής για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.
- Θα ακούσετε έναν ήχο χαμηλής έντασης που υποδεικνύει ότι η συσκευή κεφαλής έχει απενεργοποιηθεί και, μετά από 10 δευτερόλεπτα, η εφαρμογή θα ξαναρχίσει να αναζητά τη συσκευή κεφαλής σας.
- Φορτίστε τη συσκευή κεφαλής σας μετά από κάθε χρήση, ώστε να είναι έτοιμη για την επόμενη συνεδρία σας.

4. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή κεφαλής μου ενεργοποιείται, αλλά δεν με αφήνει να ξεκινήσω μια συνεδρία	Η συσκευή κεφαλής είναι συνδεδεμένη στο καλώδιο φόρτισης	Αποσυνδέστε το καλώδιο προτού επιχειρήσετε να ξεκινήσετε μια συνεδρία
Η συσκευή κεφαλής μου δεν ενεργοποιείται	Η συσκευή κεφαλής δεν είναι φορτισμένη	Συνδέστε τη συσκευή κεφαλής στο καλώδιο φόρτισης
	Η συσκευή κεφαλής έχει εισέλθει σε κατάσταση τερματισμού λειτουργίας	Συνδέστε τη συσκευή κεφαλής στο καλώδιο φόρτισης και προσπαθήστε να την ενεργοποιήσετε
Η συσκευή κεφαλής μου λειτουργεί για λίγο και κατόπιν απενεργοποιείται μόνη της	Η αντίσταση ανάμεσα στα επιθέματα είναι πολύ υψηλή	Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει τα μαντηλάκια αλκοόλης προτού εφαρμόσετε τα επιθέματα γέλης στο δέρμα σας, ότι τα επιθέματα είναι τοποθετημένα σωστά πίσω από τα αυτιά σας και ότι δεν υπάρχουν μαλλιά ανάμεσα στα επιθέματα και το δέρμα σας
	Τα επιθέματα που είναι προσαρτημένα στα ηλεκτρόδια είναι φθαρμένα	Αντικαταστήστε τα επιθέματα γέλης στη συσκευή κεφαλής

<p>Η συσκευή κεφαλής μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου</p>	<p>Το Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένο στο τηλέφωνό σας</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth® έχει ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνό σας</p>
	<p>Το τηλέφωνό σας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα όταν αναζητά τη συσκευή κεφαλής</p>	<p>Επανεκκινήστε την εφαρμογή στο τηλέφωνό σας</p>
<p>Κατά τη διάρκεια της σύζευξης, ακούω 3 σύντομους ήχους χαμηλής έντασης και η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει 3 φορές με μπλε χρώμα</p>	<p>Το χρονικό όριο της συσκευής κεφαλής έληξε ενώ περίμενε να αποδεχτείτε το αίτημα σύζευξης από το τηλέφωνο</p>	<p>Απενεργοποιήστε τη συσκευή κεφαλής και επιχειρήστε ξανά τη σύζευξη, ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα «Σύζευξη της συσκευής κεφαλής με το τηλέφωνό σας»</p>
<p>Αισθάνομαι δυσφορία όταν χρησιμοποιώ τη συσκευή κεφαλής</p>	<p>Η στάθμη ισχύος της συσκευής ενδέχεται να είναι πολύ υψηλή</p>	<p>Μειώστε τη στάθμη ισχύος της συσκευής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μέχρι να νιώσετε μια απαλή αίσθηση λικνίσματος ή μέχρι να υποχωρήσει η δυσφορία</p>
<p>Όταν συνδέω τη συσκευή κεφαλής στον φορτιστή, η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα</p>	<p>Η συσκευή αντιμετωπίζει κάποιο σφάλμα φόρτισης</p>	<p>Δοκιμάστε να συνδέσετε το καλώδιο φόρτισης σε μια διαφορετική υποδοχή USB και αν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης</p>
<p>Η ενδεικτική λυχνία LED στη συσκευή κεφαλής μου αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα και ακούω 3 σύντομους ήχους χαμηλής έντασης</p>	<p>Η στάθμη μπαταρίας της συσκευής κεφαλής είναι χαμηλή</p>	<p>Φορτίστε τη συσκευή κεφαλής (δείτε την ενότητα «Φόρτιση της συσκευής κεφαλής»)</p>
<p>Όταν προσπαθώ να ενεργοποιήσω τη συσκευή κεφαλής, ακούω 3 ήχους χαμηλής έντασης</p>	<p>Η στάθμη μπαταρίας της συσκευής κεφαλής είναι κρίσιμα χαμηλή</p>	<p>Φορτίστε τη συσκευή κεφαλής (δείτε την ενότητα «Φόρτιση της συσκευής κεφαλής»)</p>

5. Φροντίδα του Modius™

Συσκευή κεφαλής

Τι να κάνετε

- Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή κεφαλής μετά τη χρήση (ή αποσυνδέστε το τηλέφωνό σας από τη συσκευή κεφαλής)
- Φορτίστε πλήρως τη συσκευή κεφαλής προτού την τοποθετήσετε πίσω στη θήκη της μετά από κάθε χρήση.

Τι να μην κάνετε

- Μη χρησιμοποιείτε ισχυρές αποξεστικές ουσίες ή απορρυπαντικά.
- Αποφεύγετε να βρέχετε τη συσκευή κεφαλής
- Μη βυθίζετε σε υγρό.
- Μην εκθέτετε σε υπερβολικό ηλιακό φως.
- Μη αφήνετε το Modius™ σε κατάσταση στην οποία ο κεφαλόδεσμος συνθλίβεται ή τεντώνεται. Αυτό θα επηρεάσει την άνεση και την ασφάλεια της προσαρμογής στο κεφάλι σας.

Επιθέματα γέλης

Τι να κάνετε

- Για να καθαρίσετε το δέρμα προτού προσαρτήσετε τα επιθέματα γέλης, απομακρύνετε με μια βούρτσα τυχόν τούφες μαλλιών, διαφορετικά ενδέχεται να κολλήσουν στα επιθέματα.
- Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι καθαρό και χωρίς μακιγιάζ, κρέμες και άλλες λοσιόν, προτού χρησιμοποιήσετε τα επιθέματα.
- Καθαρίστε τα χέρια σας προτού χειριστείτε τα επιθέματα και αγγίξετε τα με τα δάχτυλά σας όσο το δυνατόν λιγότερο.
- Απορρίψτε τα επιθέματα σε κατάλληλο δοχείο ή κάδο μετά τη χρήση.

Τι να μην κάνετε

- Μη μοιράζετε τα επιθέματα γέλης με κανέναν άλλο. Τα επιθέματα προορίζονται για χρήση από ένα μόνο άτομο.
- Μη χρησιμοποιείτε ένα επίθεμα για περισσότερο από τη συνιστώμενη 1 ώρα ανά συνεδρία.

6. Γενικές πληροφορίες προϊόντος και τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές: Συσκευή κεφαλής Modius™

Όνομα μοντέλου	ML600
Κανάλια	Μονό

Τροφοδοσία	
Διάρκεια μπαταρίας	Περίπου 10 ώρες σε στάθμη διέγερσης 10 – Περίπου 4 ή 5 ημέρες ονομαστικής χρήσης
Υποδοχή εισόδου	Πλήρως μονωμένη micro USB με προστασία από άγγιγμα
Βάρος	85 g
Μέγεθος	180x140x70mm
Πληροφορίες εισόδου τροφοδοσίας	
Μicro Τάση Μέγιστη ένταση ρεύματος	Θύρα USB 4,75 – 5,25 V 155 mA DC
Μέγιστη τάση εξόδου Μέγιστη ένταση ρεύματος εξόδου	20 V 600uA.
Bluetooth BLE - BGM113	
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	2,4 GHz για τη λειτουργικότητα χαμηλής ενέργειας Bluetooth
Μέγιστη ισχύς RF που μεταδίδεται	+3 dBm
Μπαταρία (Η μπαταρία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη)	
Πολυμερών λιθίου	3,7 v 165 mAh
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 έως 50°C
Θερμοκρασία φύλαξης:	-20 έως 60°C
Αντοχή στο νερό	0 m
Αναμενόμενη διάρκεια ζωής	<p>Η συσκευή παρέχεται με εγγύηση 1 έτους, αλλά συχνά διαρκεί περισσότερο.</p> <p>Τα παρελκόμενα (καλώδια, επιθέματα και μαντηλάκια) δεν καλύπτονται από την εγγύηση</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Η διάρκεια ζωής των καλωδίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση. Πάντα να χειρίζεστε τα καλώδια με προσοχή <input type="checkbox"/> Τα επιθέματα ηλεκτροδίων προορίζονται για 1 μόνο εφαρμογή, ανατρέξτε στις πληροφορίες του κατασκευαστή για την ημερομηνία λήξης. <input type="checkbox"/> Όσον αφορά τα μαντηλάκια, ανατρέξτε στη συσκευασία του κατασκευαστή για την ημερομηνία λήξης.
Διάρκεια ζωής κατά τη φύλαξη	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Η μονάδα συσκευής κεφαλής δεν έχει σταθερή διάρκεια ζωής κατά τη φύλαξη

-
- Ανατρέξτε στις πληροφορίες του κατασκευαστή για τη διάρκεια ζωής κατά τη φύλαξη των παρελκόμενων (επιθέματα, καλώδια και μαντηλάκια)
-



Το προϊόν κατασκευάζεται από τη Neurovalens, Ormeau Baths, 18 Ormeau Avenue, Μπέλφαστ, Β. Ιρλανδία, BT2 8HS.



Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη και θα πρέπει να προστατεύεται από υγρά



Ανατρέξτε στα πρόσθετα σύμβολα και το εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες



Σειριακός αριθμός στην ετικέτα προϊόντος για την ταυτοποίηση του προϊόντος

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλώσιμα (επιθέματα ηλεκτροδίων, μαντηλάκια)

Χρησιμοποιείτε μόνο τα αναλώσιμα που παρέχονται στη συσκευασία ή συνιστώνται από τη Neurovalens. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πολιτική επιστροφής και εγγύησης

Για περαιτέρω πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.modiushealth.com/conditionsofsale

7. Ειδοποιήσεις κανονισμών και ασφαλείας

Δήλωση συμμόρφωσης - Όνομα μοντέλου: ML600

Με την παρούσα, η Neurovalens δηλώνει ότι αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών: Οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων - 2001/95/EK και Οδηγία για τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού 2014/53 ΕΕ. Για να δείτε την πλήρη Δήλωση συμμόρφωσης, μεταβείτε στη διεύθυνση www.modiushealth.com/compliance.



Περιέχει FCC ID: QOQBG113

Αυτή η συσκευή πληροί το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει,

συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.



Το Modius™ συμμορφώνεται με τις εφαρμόσιμες ουσιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας για τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού 2014/53 ΕΕ.

FDA Ο Οργανισμός Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων των Η.Π.Α. (FDA) θεωρεί το Modius™ μια συσκευή γενικής ευεξίας και, συνεπώς, δεν επιβάλλει ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Πιστοποιημένο μέσω της Siliconlabs
FCC ID:
IC ID:

FCC-15C
QOQBGM113
5123A-BGM113

Δήλωση ασφαλείας

Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί ώστε να πληροί την πιστοποίηση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ασφαλείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Προτύπων EN: EN301489-3, EN301489-17 και EN 60950-1

Το Modius™ έχει δοκιμαστεί και πληροί τα αναγνωρισμένα πρότυπα για ατρωσία στις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων στο εύρος συχνοτήτων των 2,4 GHz.

Σημείωση: Το Modius™ ενδείκνυται αποκλειστικά για υποβοήθηση ενηλίκων, ηλικίας άνω των 18 ετών, με την απώλεια βάρους και τους στόχους διαχείρισης του βάρους τους.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας - Συσκευή κεφαλής

Προσοχή:

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κεφαλής Modius™, ανατρέξτε στις πληροφορίες και τις οδηγίες που παρέχονται.

Τοποθετείτε τα επιθέματα γέλης ηλεκτροδίων μόνο στις μαστοειδείς αποφύσεις, πίσω από τα αυτιά, όπως αναφέρεται στις οδηγίες που παρέχονται. Μην τα τοποθετείτε στο στήθος σας ή σε άλλο σημείο στο κεφάλι ή στον λαιμό.

Μην το χρησιμοποιείτε αν είστε έγκυος, αν έχετε αντανακλαστική επιληψία που ενεργοποιείται από αιθουσαία διέγερση ή αν έχετε βηματοδότη.

Η χρήση του Modius™ θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως αν προκύψουν μη αναμενόμενες αντιδράσεις.

Τι να κάνετε

Εφαρμόζετε τα επιθέματα μόνο στις μαστοειδείς αποφύσεις, τη σκληρή οστεώδη περιοχή πίσω από τα αυτιά σας, όπως αναφέρεται στις παραπάνω οδηγίες. Μην τα τοποθετείτε στο στήθος σας ή σε άλλο σημείο στο κεφάλι ή στον λαιμό. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς να φορέσετε τη συσκευή κεφαλής σας».

Χρησιμοποιείτε το μόνο ενώ κάθεστε ή είστε ξαπλωμένοι.

Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από κανένα άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Τι να μην κάνετε

Μην το χρησιμοποιείτε αν είστε έγκυος, αν έχετε αντανακλαστική επιληψία που ενεργοποιείται από αιθουσαία διέγερση ή αν έχετε εμφυτευμένο βηματοδότη, καρδιακό απινιδωτή ή συσκευή νευροδιέγερσης. Σημείωση: Το Modius™ διεγείρει το αιθουσαίο σύστημα (ισορροπίας) του εγκεφάλου. Επομένως, ενώ αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα περισσότερα άτομα με επιληψία, μπορεί να ενεργοποιήσει μια κρίση σε κάποιον με αντανακλαστική αιθουσαία

επιληψία. Αν έχουν αμφιβολίες, οι δυνητικοί χρήστες με επιληψία θα πρέπει πρώτα να το συζητήσουν με τον οικογενειακό ιατρό τους.

Μην το χρησιμοποιείτε ενώ κινείστε, καθώς μπορεί να επηρεάσει την αίσθηση ισορροπίας σας.

Μην το χρησιμοποιείτε ενώ καταναλώνετε αλκοόλ, οδηγείτε ή χειρίζεστε μηχανήματα οποιουδήποτε είδους.

Μην το χρησιμοποιείτε σε υγρά περιβάλλοντα και μη βυθίζετε τη συσκευή κεφαλής σε νερό.

Μη μοιράζεστε τα επιθέματα γέλης σας με κανέναν άλλο. Προορίζονται για χρήση από ένα μόνο άτομο.

Μη χρησιμοποιείτε ένα επίθεμα για περισσότερο από τη συνιστώμενη 1 ώρα ανά συνεδρία.

Συνιστάται να απορρίπτετε το επίθεμα μετά από κάθε χρήση. Η παρατεταμένη ή επανειλημμένη χρήση οποιουδήποτε μεμονωμένου επιθέματος ενδέχεται να περιορίσει την αποτελεσματικότητά του ή να οδηγήσει σε ερεθισμό του δέρματος.

Μην εφαρμόζετε τα επιθέματα σε τραυματισμένο ή ερεθισμένο δέρμα.

Αφαιρείτε τα επιθέματα προσεκτικά από το δέρμα μετά τη χρήση. Απορρίψτε τα επιθέματα σε κατάλληλο δοχείο ή κάδο.

Μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες. Δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τον χρήστη.

Σημείωση:

Η συσκευή δεν είναι ιατρική συσκευή ούτε αποτελεί υποκατάστατο ενός υγιεινού τρόπου ζωής ή επαγγελματικής ιατρικής περίθαλψης.

Η χρήση του Modius™ θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως αν προκύψουν μη αναμενόμενες αντιδράσεις. Αν νιώσετε οποιαδήποτε δυσφορία κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας, διακόψτε τη συνεδρία και μειώστε την ένταση προτού συνεχίσετε. Οι πιθανοί κίνδυνοι ή οι ανεπιθύμητες επιδράσεις περιλαμβάνουν τα εξής: ερεθισμός δέρματος, δυσφορία από τη διέγερση, αίσθηση απώλειας ισορροπίας, περιστασιακή ναυτία και, σπάνια, εμετός. Αν κάποιο πρόβλημα επιμείνει για περισσότερες από 1-2 ημέρες, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

Η συνιστώμενη χρήση είναι 45 λεπτά/1 ώρα το μέγιστο ανά ημέρα. Το Modius™ θα διακόψει αυτόματα τη διέγερση αν υπερβείτε την 1 ώρα χρήσης ανά ημέρα – ή στην πραγματικότητα σε μια περίοδο 16 ωρών, προκειμένου να μην είναι «κλειδωμένο», αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Modius™ λίγες ώρες νωρίτερα κάποια ημέρα.

Οι οδηγίες επαναφοράς δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται καταχρηστικά, προκειμένου να αυξηθεί η προσωπική ημερήσια χρήση.

Διαβάστε και τηρήστε αυτές τις προειδοποιήσεις και οδηγίες. Κρατήστε αυτόν τον οδηγό μαζί με τη συσκευή κεφαλής σας

Προφυλάξεις για την ενσωματωμένη μπαταρία

Το προϊόν συσκευής κεφαλής Modius™ έχει μια ενσωματωμένη μπαταρία, η οποία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη.

Μην παραποιείτε το προϊόν σας και μην επιχειρείτε να το ανοίξετε, καθώς αυτό θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο για την ασφάλεια.

Φορτίζετε τη συσκευή κεφαλής σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο, χρησιμοποιώντας τροφοδοτικό που είναι πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμών.

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης



Μία από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΚ αναφέρει ότι κάθε ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ηλεκτρονικό απόβλητο και δεν θα πρέπει να απορρίπτεται. Ως υπενθύμιση της εν λόγω οδηγίας, όλα τα προϊόντα που επηρεάζονται επισημαίνονται πλέον με το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, όπως απεικονίζεται παραπάνω.

Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, μην απορρίψετε αυτό το προϊόν ή τις μπαταρίες στον οικιακό κάδο απορριμμάτων, αλλά παραδώστε το σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η εσφαλμένη απόρριψη μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση επιβλαβών τοξινών στον αέρα, το νερό και το έδαφος και μπορεί να είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία.

Σημείωση: Απορρίψτε τα επιθέματα και τα μαντηλάκια σε κατάλληλο δοχείο ή κάδο.

Πληροφορίες άδειας χρήσης



Το Modius™ χρησιμοποιεί Bluetooth

Όροι και προϋποθέσεις

Για περαιτέρω πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.modiushealth.com/conditionsofsale

8. Επικοινωνία

www.modiushealth.com
hello@modiushealth.com
support.modiushealth.com



Κατασκευάζεται από τη Neurovalens, Ormeau Baths, 18 Ormeau Avenue, Μπέλφαστ, BT2 8HS.